

URINSAMMLUNG: UNTERSUCHUNG AUF STI EMPFEHLUNGSBOGEN

Geburtsname: _____

Name: _____

Vorname: _____

Geburtsdatum: / /

CNS Nr.:

E-Mail: _____@_____

00/+

Feld reserviert
für das Labor

Probenahme

Datum: / /

Uhrzeit: h



01.
Waschen Sie sich die Hände



02.
Sammeln Sie den ersten
Urinstrahl in dem Becher



Sachet

04.
Geben Sie den Becher
und das Blatt in den
luftdichten Beutel und
verschließen Sie ihn



Sammeln Sie wenn
möglich den ersten Urin
morgens oder 4 Stunden
nach dem letzten
Urinieren



Berühren Sie nicht die
im Deckel integrierte
Kanüle



03.
Notieren Sie Ihre Name
und Vorname auf den
Becher und füllen Sie das
Identifikationsfeld diesen
Bogens aus



Ein Center finden

05.
Bringen Sie den Beutel unter
Einhaltung der unten ange-
gebenen Aufbewahrungsfrist
zu einem unserer Zentren

AUFBEWAHRUNG DER PROBENAHME

+20 °C
Maximal
24 Stunden

+4 °C
Maximal
48 Stunden



Sparen Sie Zeit,
melden Sie sich vorher an